

ASSURE[®] FeLV



Date de création : 30-09-2021

Date de mise à jour : 30-09-2021

Informations produit

Caracteristiques

Test rapide de détection des antigènes du FeLV sur salive.

Contenu du kit :

- 25 écouvillons sensibilisés avec l'anticorps anti-FeLV ;
- 25 pipettes de transfert qualibrées ;
- 25 tubes de conjugué contenant les anticorps monoclonaux (tube A) ;
- 25 tubes de Tampon substrat (Tube B) ;
- 1 flacon C chromogène (bouchon blanc de 3 mL) ;
- 1 flacon D, diluant pour échantillon de salive (bouchon bleu, 3 mL) ;
- 1 support pour tube.

Utilisation

Chez un chat asymptotique : le chaton lors du premier examen, le chat adulte lors d'un dépistage avant vaccination ou lors d'une situation à risque.

Chez un chat malade même vacciné lors de suspicion de FeLV, quelque soit l'âge, même lorsque les précédents tests étaient négatifs.

Mode d'emploi

1. Prélèvement : déposer 3 gouttes de solution D (capuchon bleu) dans le tube A et mélanger en agitant le tube. Prélever de la salive entre la joue et la gencive à l'aide de l'écouvillon fournit.
2. Incubation : agiter l'écouvillon porteur de salive dans le tube A pendant 3 secondes, puis laisser l'écouvillon incuber dans le tube pendant 10 minutes.
3. Préparation du tube B : mettre 3 gouttes du flacon C (capuchon blanc) dans le tube B, mélanger en agitant le tube. réserver pour l'étape 5.
4. Rinçage : à la fin de la période d'incubation de 10 minutes, retirer l'écouvillon du tube A et rincer soigneusement l'extrémité ronde soit à l'aide de 5 jets toniques de NaCl 0,9 % de 5 secondes, soit en l'agitant dans 100 ml de NaCl 0,9 % pendant 30 secondes.
5. Coloration : placer ensuite l'écouvillon rincé dans le tube B contenant la solution C préparé à l'étape 3. Mélanger pendant 3 secondes, puis laisser l'écouvillon dans le tube pendant 5 minutes, mais jamais plus de 10 minutes.
6. lecture : observer le tube B sur fond blanc : le test est positif si une couleur bleu apparait.

Précautions d'emploi

Respecter les différentes étapes de la procédure, selon le mode d'emploi.

Conservation

Conserver le kit à une température de +2 à +7°C. Ne pas congeler.

Propriétés

ASSURE[®] FeLV est un test immuno-enzymatique qui utilise des anticorps reconnaissant spécifiquement l'antigène p27 dans le sang et la salive du chat.

L'extrémité renflée des écouvillons est sensibilisée avec l'anticorps dirigé contre l'antigène p27, spécifique du virus

FeLV. Un second anticorps dirigé contre l'antigène p27 est conjugué à l'enzyme peroxydase de raifort. L'échantillon est incubé en une seule étape avec à la fois l'écouvillon sensibilisé avec l'anticorps anti-FeLV et les anticorps conjugués à l'enzyme. Si l'antigène est présent, il est capturé par l'écouvillon et les anticorps marqués par l'enzyme sont à leur tour capturés par l'antigène sur l'écouvillon. Les anticorps marqués par l'enzyme, restés libres, sont rincés et l'écouvillon est placé dans un substrat chromogène.

L'apparition d'une nette coloration bleue dans la solution signe la présence de l'antigène FeLV. En l'absence de FeLV, aucune couleur n'apparaît.

En cas d'utilisation d'un échantillon de salive, ASSURE® FeLV peut détecter les antigènes chez un chat qui excrète activement le virus en 15 à 20 min.

Présentations

Présentation et quantité

ASSURE® FeLV boîte de 25 tests

Code GTIN : 05414736027142

Laboratoire



ZOETIS
10 RUE RAYMOND DAVID
92240 MALAKOFF
Zoetis Assistance 0810 734 937
<http://www.zoetis.fr>