

DERMAPLIQ Spray

Caractéristiques:

Produit d'hygiène à usage externe pour animaux ; substitut de matrice extracellulaire.

Les polymères de carboxyméthylglucose sulfate (RGTA = *ReGeneraTing Agents*) sont des biopolymères de structure proche des héparanes sulfate.

Solution stérile à usage externe.

Composition par ordre décroissant:

Composants :

RGTA (polymères de carboxyméthylglucose sulfate) 750 µg

Excipients QSP 7,5 ml

Fonction du produit:

Chez les chiens, chats, chevaux et NAC : apport local de substitut de matrice extracellulaire.

Mode d'emploi:

Usage externe.

1- Nettoyer la zone concernée.

2- Pulvériser DERMAPLIQ Spray en tenant le flacon à environ 5 cm de la zone.

3- Laisser agir au moins 5 minutes avant l'application d'un traitement médicamenteux éventuel ou la pose d'un pansement.

DERMAPLIQ Spray agit sur du tissu vivant.

Répéter l'application tous les 2 à 3 jours en fonction de l'évolution. Il est déconseillé d'utiliser le produit quotidiennement. La durée d'utilisation peut varier d'une à plusieurs semaines.

Votre vétérinaire peut être amené à adapter le mode d'emploi proposé. Bien suivre ses recommandations.

Un flacon de 7,5 ml permet environ 50 pulvérisations.

Le système 3K® de la pompe empêche l'entrée de germes ou d'impuretés à l'intérieur du flacon.

Précaution d'emploi:

Conserver le produit dans son emballage d'origine à une température inférieure à 25°C.

DERMAPLIQ Spray ne contient pas de conservateur.

Utiliser le produit dans le mois qui suit la première pulvérisation.

Boe de 1 flacon pulvisateur de 7,5 ml de solution stérile

GTIN : 03700454502224

Laboratoire TVM

57 rue des Bardines

63370 LEMPDES

Tél : 04.73.61.72.27

Fax : 04.73.61.93.94

Service clients TVM : 04.73.61.75.76

service.clients@tvm.fr labotvm@tvm.fr www.tvm.fr

tvmlab
INNOVATIVE
ANIMAL HEALTH