



Mèches dilatatrices[®] Vétoquinol

Mèches stériles intramammaires
pour bovins, ovins et caprins.



MÈC

Forme et composition

Mèches stériles sur support vaseline.

Utilisation

Chez les vaches, brebis et chèvres :

- *Retrécissement du sphincter du canal galactophore* : génisses en première lactation.
- *Maintien de l'ouverture du canal galactophore, en complément de traitement lors de :*
 - Congestion de l'extrémité des trayons,
 - Machine à traire mal réglée,
 - Atrésie du canal du trayon,
 - Accidents du trayon,
 - Suites de trayonotomie : convalescence, cicatrisation,
 - Thélite nodulaire,
 - Sténose du sphincter,
 - Papillomatose du canal.

Précautions d'emploi

Refermer correctement la boîte après chaque usage.

Mode d'emploi et voie d'administration

Voie galactophore.

Bovins, ovins, caprins :

- Après désinfection soignée du trayon, introduire lentement dans le canal galactophore la mèche par son extrémité plastifiée.
- Après pénétration complète de la mèche jusqu'à la crosse, tourner celle-ci vers l'intérieur de la mamelle pour éviter tout arrachement lors des mouvements du membre postérieur correspondant.
- Avant chaque traite, retirer la mèche avec un mouvement alternatif de rotation de droite à gauche.
- Replacer une nouvelle mèche après chaque traite.
- Poursuivre l'application pendant 5 jours minimum.

Propriétés

Les mèches dilatatrices sont atraumatiques. Elles sont conservées de façon très hygiénique dans une boîte hermétique.

Elles permettent :

- une dilatation permanente du canal du trayon,
 - une cicatrisation des blessures du trayon,
 - une traite facilitée,
 - une régénération naturelle du sphincter.
- Dans les cas graves, une thérapeutique anti-infectieuse peut être associée.

Catégorie

Produit d'hygiène.

Présentation

Boîte hermétique de 20 mèches
GTIN 03605877021140