

Date de création : 05-10-2021

Date de mise à jour : 05-10-2021

Informations produit

Caractéristiques

Test d'identification bactérienne et profil de sensibilité aux antibiotiques pour les infections cutanées, auriculaires et urinaires :

- mini-galeries de culture.
- milieux de conservation, milieux de culture et réactifs spécifiques.
- matériel de manipulation et fiches de résultat.

Nécessite un incubateur régulé à +37°C ou une plaque chauffante calibrée.

Utilisation

Chez les chiens, chats et autres animaux de compagnie :

- détermination du profil de sensibilité : amoxicilline, amoxicilline + acide clavulanique, céfalexine, enrofloxacin, marbofloxacin, doxycycline, clindamycine, spiramycine, flumiquine, gentamicine, néomycine, polymyxine B, ceftiofur, sulfamide + triméthoprime, acide fusidique.
- identification des germes : staphylocoques, streptocoques, *Escherichia coli*, *Pseudomonas*, entérobactéries, *Proteus* et *Malassezia*.

Mode d'emploi

Bien lire le mode d'emploi.

Le prélèvement doit être réalisé de manière stérile.

Ensemencer la galerie en suivant la procédure présentée dans le mode d'emploi.

Après ensemencement de la galerie, laisser incuber dans une étuve ou sur une plaque chauffante calibrée à une température de 37°C.

Détermination du profil de sensibilité aux antibiotiques : après 24 heures d'incubation. La résistance à un antibiotique se traduit dans chaque puits par l'apparition d'une couleur rouge.

Identification bactérienne et fongique : après 48 heures d'incubation : la présence des bactéries se traduit par un virage de couleur dans les puits concernés.

Conservation

Conserver le kit jusqu'à 16 mois au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C).

Propriétés

Speed Biogram™ permet d'évaluer le profil de sensibilité à 15 antibiotiques et d'identifier les germes responsables lors d'infections cutanées, urinaires et auriculaires chez le chien ou le chat.

Speed Biogram™ se réalise directement à partir du prélèvement, sans étape d'isolement des bactéries. L'interprétation est visuelle par virage de couleur des puits de la galerie.

Présentations

Présentation et quantité

Speed Biogram 5 tests

Code GTIN : 03700600500258

Laboratoire

VIRBAC France
Espace Azur Mercantour
3^e rue LID



06510 CARROS
<http://fr.virbac.com>