

Speed Duo FeLV/FIV[®]

Speed FeLV[®]

Speed FIV[®]

Date de création : 11-06-2021

Date de mise à jour : 20-02-2018

Informations produit

Caracteristiques

Kit de diagnostic rapide contenant :

- cellules test.
- pipettes à usage unique.
- flacon(s) de réactif.

Utilisation

Chez le chat :

- diagnostic de l'infection par le FeLV et/ou le FIV chez le chat en présence de symptômes.
- dépistage de l'infection par le FeLV et/ou le FIV chez le chat avant vaccination, en cas de suspicion d'exposition aux rétrovirus, ou en l'absence de commémoratifs.

Mode d'emploi

Réaliser un prélèvement de plasma, sérum ou sang total avec anticoagulant.

Déposer une goutte d'échantillon avec la pipette fournie au centre du puits en maintenant la pipette en position verticale. Attendre 10 à 15 secondes. Ajouter 5 gouttes de réactif au centre du puits en maintenant le flacon de réactif en position verticale.

Laisser migrer 15 minutes et lire le résultat directement dans la fenêtre de lecture de la cellule.

Apparition d'une bande test et d'une bande contrôle : test positif.

Apparition d'une bande contrôle seule : test négatif.

Précautions d'emploi

Ne pas mélanger les réactifs de lots différents.

Conservation

Conserver le kit jusqu'à 24 mois à température ambiante (entre +2°C et +30°C)

Propriétés

Tests immunochromatographiques rapides sur membrane pour la détection de l'antigène P27 du virus FeLV et/ou des anticorps anti-GP40 du FIV chez le chat.

Présentations

Présentation et quantité

Speed Duo FeLV/FIV 6 tests

Code GTIN : 03700600500098

Speed Duo FeLV/FIV 20 tests

Code GTIN : 03700600500067

Speed Duo FeLV/FIV 50 tests

Code GTIN : 03700600500081

Speed FeLV 6 tests

Code GTIN : 03700600500197

Speed FeLV 20 tests

Code GTIN : 03700600500173

Speed FIV 6 tests

Code GTIN : 03700600500135

Laboratoire



VIRBAC France
Espace Azur Mercantour
3^e rue LID
06510 CARROS
<http://fr.virbac.com>